

**Contour**  
Évoluer avec vous

# GlucoContro.online

Un portail Web facile à utiliser  
pour aider vos patients  
à gérer leur diabète\*



Invitez vos patients à partager  
leurs résultats glycémiques par  
l'intermédiaire de notre système sécurisé  
CONTOUR®CLOUD ou connectez-vous  
directement pour télécharger les résultats.

[www.glucocontro.online](http://www.glucocontro.online)

 **GlucoContro**  
.online

\*Les patients doivent être inscrits sur GlucoContro.online et consentir  
à partager leurs données avec leur professionnel de la santé.

## Accès facile aux informations sur la glycémie du patient

Enregistrement rapide grâce à un tableau de bord facile à comprendre



**Statistiques  
sommaires du tableau  
de bord** avec la liste  
complète des **patients  
enregistrés**



**Accès rapide et facile**  
aux données de l'application  
**CONTOUR®DIABETES**  
stockées dans  
**CONTOUR®CLOUD.**



**Renseignements  
personnalisés sur  
chaque patient enregistré**  
(intervalles cibles  
glycémiques, heures)



**Générez des rapports  
et obtenez des  
renseignements**  
Incluant le rapport AGP\*,  
en PDF ou à imprimer



**John Lee** ✓  
61 âge Type 2



**Résumé rapide  
des données**  
Des graphiques avec  
codes de couleur, aussi  
simples que **vert, jaune,**  
**rouge.**



**Un environnement sécurisé** pour que  
vos patients puissent partager des  
informations avec vous\*



**Téléchargez les résultats des lecteurs  
CONTOUR®** sans autorisations de  
l'administrateur



DISPONIBLE SUR  
Google Play

Télécharger dans  
l'App Store

Fonctionne avec  
Apple Health




\* Profil glycémique ambulatoire

+Les patients devraient consulter leur professionnel de la santé avant d'apporter des modifications à leur schéma thérapeutique.


# Une nouvelle façon de visualiser les résultats glycémiques

Des tableaux de bord avec des codes de couleur permettent d'interpréter et de comprendre les résultats glycémiques


## Menu d'accès rapide :

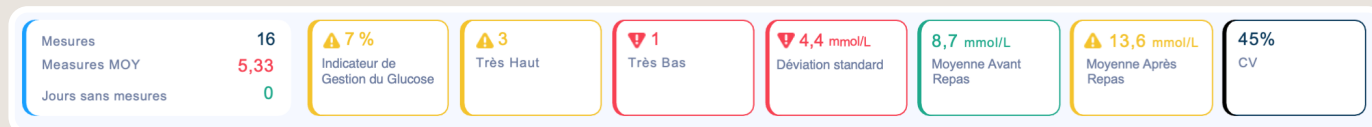

## Sommaire rapide : Informations pertinentes pour la prise de décision

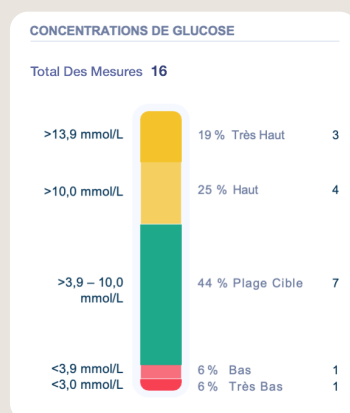

**Intervalles cibles personnalisés :**  
Affichage du pourcentage de résultats dans chaque intervalle cible de glycémie

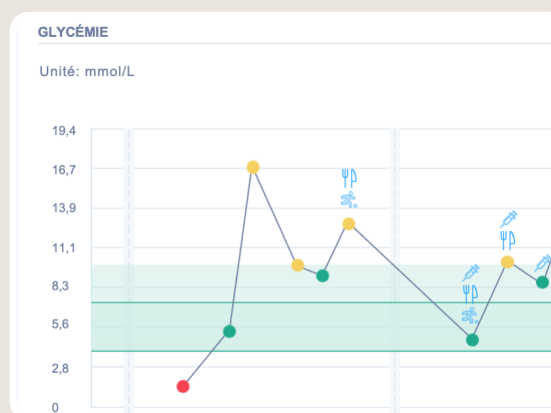

**Distribution des résultats glycémiques :**  
Visualiser la variabilité des résultats glycémiques



**Tableau récapitulatif des résultats :**  
Affichage simple de toutes les données recueillies pour chaque jour

## Résultats glycémiques :

	Total	Moyenne	Médiane	Dév. Std.	Le plus haut	Le plus bas	Haute	Cible	Basse
👤 Tout	16	9,5 mmol/L	9,9 mmol/L	4,3 mmol/L	16,8 mmol/L	2,3 mmol/L	43.75 %	43.75 %	12.5 %
🍏 A jeun	3	3,8 mmol/L	3,7 mmol/L	1,6 mmol/L	5,4 mmol/L	2,3 mmol/L	0 %	33.33 %	66.67 %
🍏 Avant le repas	3	8,7 mmol/L	9,8 mmol/L	2,4 mmol/L	10,3 mmol/L	5,9 mmol/L	33.33 %	66.67 %	0 %
🍷 Après le repas	5	13,6 mmol/L	15,0 mmol/L	3,4 mmol/L	16,8 mmol/L	9,4 mmol/L	80 %	20 %	0 %
🕒 Pas de marquage	5	9,3 mmol/L	9,9 mmol/L	2,9 mmol/L	12,7 mmol/L	4,6 mmol/L	40 %	60 %	0 %

# Inscription et ajout de patients faciles :

## 1 Inscription en 3 étapes simples :

1. Visitez [glucocontro.online](https://glucocontro.online) et cliquez Créer un compte
2. Inscrivez les renseignements demandés
3. Attendez l'approbation de l'administrateur de la clinique (cela peut prendre jusqu'à 48 heures)

**Créer un compte**

**Professionnelle**  
Si vous êtes un professionnel de la santé.

**Personnel**  
Si vous travaillez dans une clinique, mais que vous n'êtes pas un professionnel de la santé.

**Personnel**  
Si vous avez reçu un diagnostic de diabète.

**Soignant**  
Si vous vous occupez d'une personne atteinte de diabète.

**Continuer**

J'ai déjà un compte. [Se connecter](#)




**Centre d'aide GlucoContro.online :**  
[support@glucocontro.online](mailto:support@glucocontro.online)

## 2 3 options pour ajouter un nouveau patient :

### 1 – Code de la clinique

Donner le code unique de votre clinique à vos patients. Ils peuvent utiliser ce code lorsqu'ils sont connectés à GlucoContro.online pour s'inscrire à votre clinique.

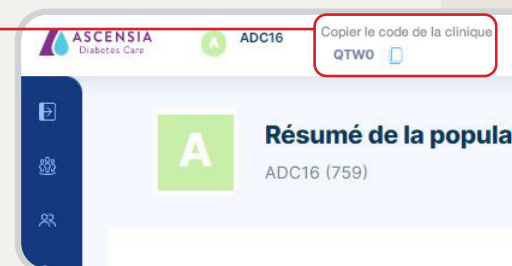

### 2 – Saisie manuelle

Saisir le nom, le prénom, le pays, l'identifiant de santé et la date de naissance du patient. Il s'agit des renseignements de base requis pour l'ajout d'un nouveau patient. Vous avez également la possibilité d'envoyer une notification à votre patient par courriel. Une fois que les précédentes étapes sont terminées, appuyer sur le bouton « Ajouter un nouveau patient »; le patient apparaîtra dorénavant dans la liste des patients.

**Ajouter un nouveau patient**

Manuel  Code QR

Prénom: Entrez le prénom  
Nom de famille: Entrez le nom de famille

Je veux envoyer une invitation par e-mail à ce patient

Pays: Canada

personalIdentifierType: British Columbia -  
personalIdentifierValue: 10 digits

Information optionnelle

**Ajouter un nouveau patient**

### 3 – Code QR

Cliquer sur Code QR et demandez au patient de balayer le code QR sur votre écran à l'aide de son appareil mobile.



© MC voir [ascensidiabetes.ca/tm-mc](https://ascensidiabetes.ca/tm-mc). © Copyright 2023. Ascensia Diabetes Care Canada Inc. Tous droits réservés.

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Retrouvez la liste des appareils compatibles à <http://compatibility.contourone.com>. SdNcenter est le fabricant légal et le concepteur de GlucoContro.online, et s'associe avec Ascensia pour commercialiser et fournir l'outil aux professionnels de la santé et aux patients qui l'utilisent.

0323-0184

